

Respirátor KN95 (ochrana úst) - biely

Obchod: Armik.sk

E-mail: info@netnakup.sk

Telefón: +420 720 278 200

Odkaz: <https://armik.sk/respirator-kn95-ochrana-ust-biely/>



Kód tovaru: KN95-STANDARD

Značka: Nezádan

Popis:

KN95 tvárová maska, filtračný efekt je až 95 percent. Vyrobené z netkanej textílie, odolnej proti vlhkosti, netoxické, neдрáždivé. Anti PM2.5, zákal, prach atď.

Štvorvrstvová textília s použitím vyspelých environmentálnych materiálov účinne odoláva jemným časticiam a baktériám pri znečistení ovzdušia. Štvorvrstvový dizajn, netkaná textília s vysokou hustotou, filtrácia - vysoko priedušná netkaná textília, ktorá môže zabrániť prachu, výfukovým plynom, peľu atď.

Respirátor alebo respiračné rúška po nasadení filtruje vzduch, ktorý vdychujete a zachytáva škodlivé látky, aby sa nedostali do vášho dýchacieho systému. Používanie respirátora je doplnkovou ochranou, rovnako ako ochranné okuliare alebo ochranný odev. Respirátor je jednorazová ochranná pomôcka a bežne je určená na 8 hodinové použitie.

Vlastnosti:

- hmotnostný prietok vzduchu: 85 l/min
- aerosólové častice: NaCl
- koncentrácia aerosólu: 15 mg/m³
- relatívna vlhkosť: 35,8 %
- účinnosť filtra: $\geq 95,0$ (KN95)
- inhalačný odpor (Pa): ≤ 350 (GB 2626-2006 6.5)
- exspiračný odpor (Pa): ≤ 250 (GB 2626-2006 6.6)

Návod na použitie:

1. Pred prvým použitím je nutná dôkladná hygiena rúk pomocou mydla a teplej vody. Po umytí rúk priložte vrchnú časť respirátora k tvári a následne pritlačte na tvár jeho spodnú časť.
2. Keď respirátor dokonale priľne k vašej tvári, upravte elastické popruhy tak, aby ho udržiavali v bezpečnej polohe.
3. Správne nasadená ochranná maska musí tesne doliehať k tvári a má zakrývať ústa, nos aj bradu.
4. Muži by mali byť oholení, pretože brada môže spôsobiť netesnosti.
5. Pri snímaní masky sa dotýkajte iba popruhov, nie časti, ktorá filtruje vzduch.

Parametre:

- Trieda ochrany: KN95
- Univerzální veľkosť
- Balenie: 1 ks

Fotky:



